



[안전손잡이 사용 / 설치설명서]

안전을 위해 사용설명서와 주의사항을 충분히 읽고 사용하여 주십시오.

Made in KOREA. Cebien Co.,Ltd

안전손잡이 (실내용)

CAC-100S / CAC-100

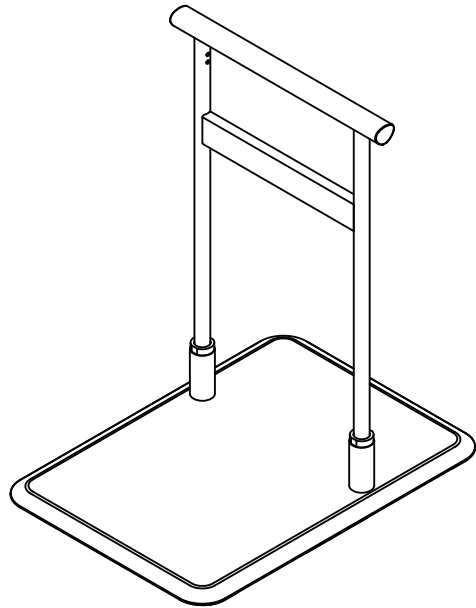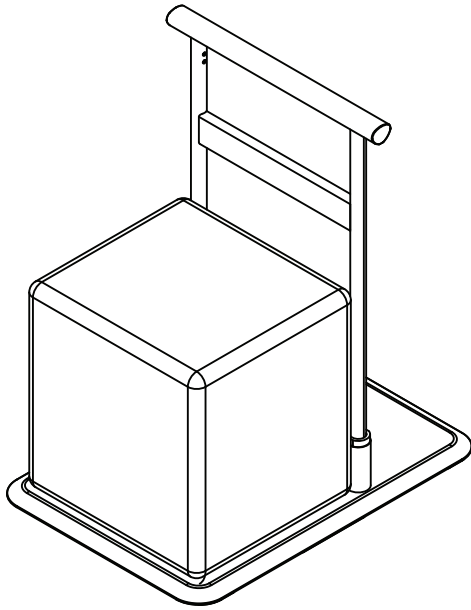

단체표준명	안전손잡이
단체표준번호	KSPA 5001
인증번호	제744호(20200610-1) / 제745호(20200610-2)
품목명 및 제품명	안전손잡이(CAC-100S,100)
제조년월	(제품박스에 표기)
제조사명	세비양(주)
A / S	070-4667-5004
제조국	한국


품질보증

본 제품은 단체표준인증단체인 당 협회에서 단체표준제품임을 보증함.
(사)한국고령친화용품산업협회


제품 설명서

제품사양

1. 품목명 : 안전손잡이
2. 제품명 : CAC-100S
3. 중 량 : 18.8KG
4. 재 질 : STEEL, 원목
5. 안전작동하중 : 80KG
6. 사이즈 : 647(W)x464(D)x766(H)
(스툴 : 395(W)x365(D)x400(H))

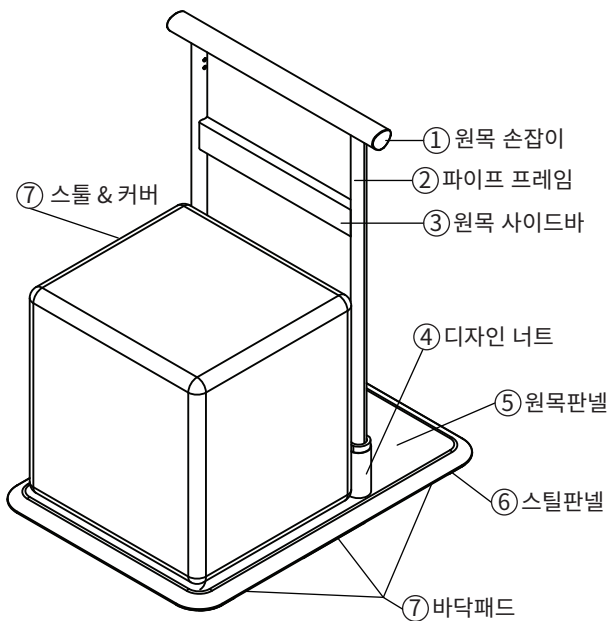

1. 품목명 : 안전손잡이
2. 제품명 : CAC-100
3. 중 량 : 11.8KG
4. 재 질 : STEEL, 원목
5. 안전작동하중 : 80KG
6. 사이즈 : 647(W)x464(D)x766(H)

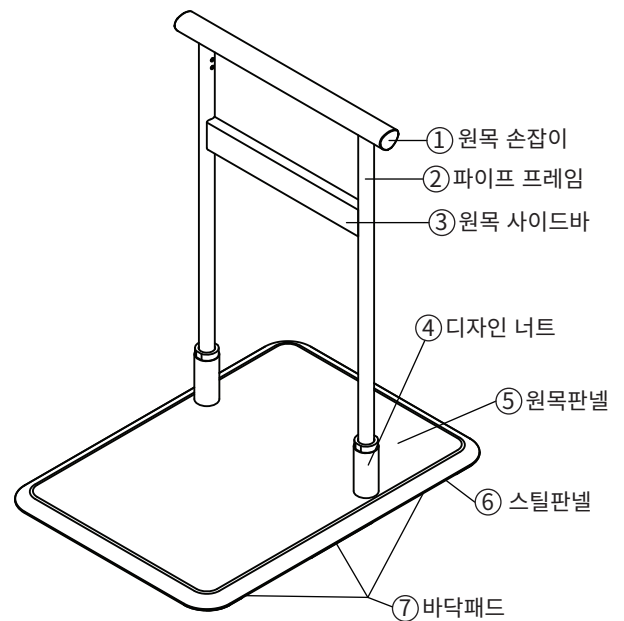

사용상 주의사항



1. 제품 설치 전 다음과 같은 사항을 잘 읽으신 후에 설치를 하여 주십시오.
2. 사용 전 조립부위가 단단히 조립되어 있는지 확인 후 사용하십시오.
3. 중성 세제를 적신 천으로 닦아 주시고 시너, 벤젠, 소금 및 염산 등의 세제는 사용하지 않습니다.
4. 세정 후 마른 헝겊으로 닦아 주십시오.
5. 과도한 충격, 하중은 파손의 원인이 되니 주의 하십시오.
6. 안전손잡이를 운동 기구 대체용으로 절대 사용하지 마십시오.
7. 아이들이 올라타거나 손잡이를 흔드는 행위는 안전사고의 위험이 있으니 제재 해주십시오.




[경고] 본 제품은 수분이 많은 환경에서는 녹이 발생할 수 있음.




소비자의 안전을 위해서 반드시 준수하십시오.
안전수칙을 무시한 사고에 대해서는 당사에게는 법적 책임이 없습니다.

[CAC-100S]

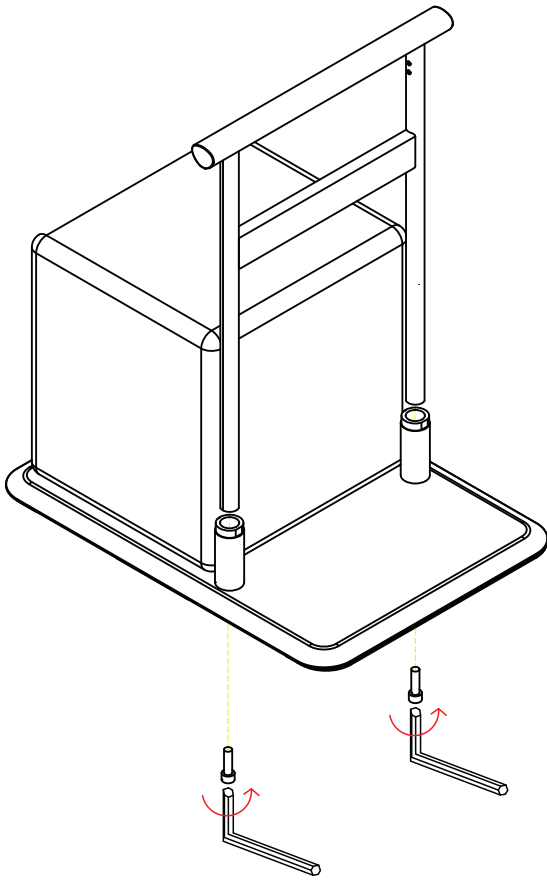

[CAC-100]

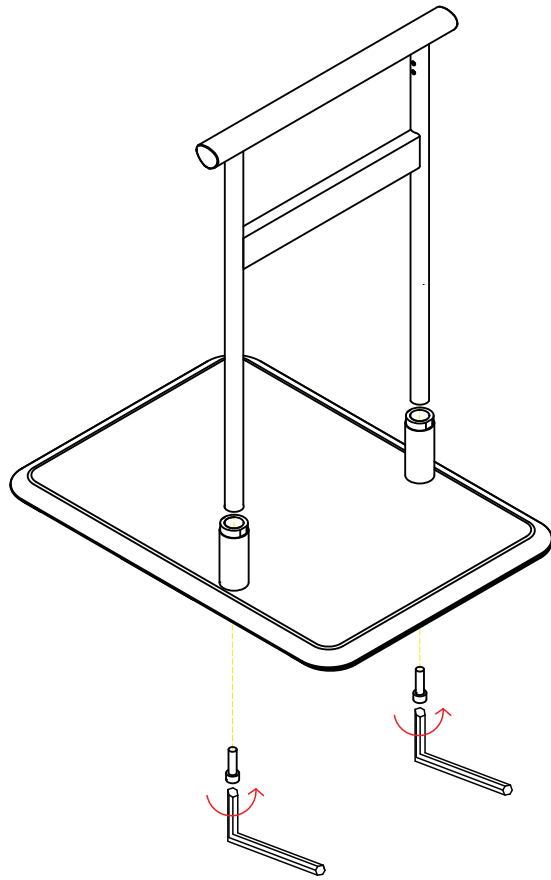

제품 설치 방법

1. 사용상 주의사항을 숙지하시고, 확인사항에 따라 설치 환경을 점검하고 위치를 설정 하십시오.
2. 볼트와 파이프 프레임 셋트를 그림과 같이 위치 시킨 후 육각렌치를 이용하여 고정시켜줍니다
3. 안전손잡이 설치 후, 손잡이의 중심에 힘을 가하여 안전하게 고정이 되었는지 확인합니다.
(제품 설치후 파이프 프레임 세트와 바닥 판넬과 완전 밀착이 되어야 합니다.)

제품보증서

안전손잡이 서비스 안내

본 제품은 가정용이며 제품의 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장에 대하여 구입일로부터 1년간 보증하여 드립니다.

- 본 제품은 세비앙(주)의 철저한 품질관리와 엄격한 검사에 합격한 제품입니다.
- 제품 고유자에게 의한 고장에 대해서는 보증기간 내에 새 제품으로 교환 및 수리해 드립니다.
- A/S 발생 및 상담은 구입 대리점 또는 본사 수호천사 사업부로 연락해주세요.
- 세비앙 수호천사 안전손잡이는 소비자기본법에 의거하여 아래와 같은 조건으로 보증하여 드립니다.
- 수리 또는 교환을 원할 때는 제품 보증서를 꼭 제시해 주세요.
- 보증서는 재발행하지 않으므로 잘 보관해 주세요.

※ 본 보증서는 보증기간 내 무상수리를 받을 수 있는 증서이므로, 제품 구입 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주세요.

모델명		구입일		시공자(업체)	
판매자상호 및 연락처				고객 성명	
고객 주소				고객 연락처	

유상서비스

※ 다음의 경우에는 보증기간 중이라도 수리 비용이 발생할 수 있습니다.

- ① 제품의 이동, 이사 등으로 인한 재설치 시
- ② 소비자가 직접 설치한 제품 또는 설치 미숙으로 인한 재설치 요청 시
- ③ 소비자의 위급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시
- ④ 본사에서 지정하지 않은 부품 사용으로 인한 고장 발생 시
- ⑤ 안전손잡이 고유 용도 이외의 사용으로 인한 고장 발생 시

※ 부품보유기간(단종 후 5년) 이후 수리가 불가능할 수 있습니다.

※ 교환 및 환불은 '소비자 피해보상 규정' 에 준합니다.

제조원 : 세비앙(주)
고객 상담 및 A/S 센터 : 070-4667-5004
경기도 광주시 오포읍 봉골길 164-11
www.1004angel.com